



Produkt-Überblick:

Die EAB 11 Adapterbox ist für den schnellen und einfachen Check der Ableitströme bei EKG Saugelektroden Anlagen konzipiert. Der handliche EAB 11 unterliegt keinerlei Wartung oder Kalibrierung und benötigt keine Stromversorgung. Die EKG Saugelektroden werden einfach auf die V2A Platten aufgesetzt und die Patientenleitungen an der oberen Seitenfläche des EAB 11 mit den numerisch codierten Buchsen des Sicherheitstesters verbunden. Die aufgesetzten Saugelektroden können mit dem mitgelieferten Klettbandgitter fixiert werden. Jetzt können die Ableitstrommessungen durchgeführt werden. Weiterhin verfügt der EAB 11 über ein angeflanshtes Präzisionsmanometer, mit dem der Unterdruck der Saugelektroden gemessen werden kann.

Produkt-Merkmale:

- Einfachste Handhabung, taschenbuchgroße Adapterbox zum Anschluss von bis zu 10 EKG Saugelektroden
- Numerisch codierte Anschlüsse analog zu den Patientenanwendungsbuchsen aller elektrischen Sicherheitstester wie z. B. ESTA und ESA 620 zur Messung von Patientenableitströmen
- Universelle 4 mm-Bananenbuchsen
- Adapterplatten aus V2A Edelstahl, poliert
- Keine Wartung nötig
- Adapter zur Anwendung von Patientensimulatoren bei EKG Saugelektrodenanlagen
- Kunststoffgehäuse (T x B x H = 191 x 135 x 45mm, Gewicht: ca. 250 g)

Weitere Informationen:




Anwendungsbeispiele und Möglichkeiten:



Der EAB dargestellt mit den 4 Klettbändern zum Fixieren der Saugelektroden und der 10 Patientenleitungen



EAB mit 10 aufgelegten Saugelektroden

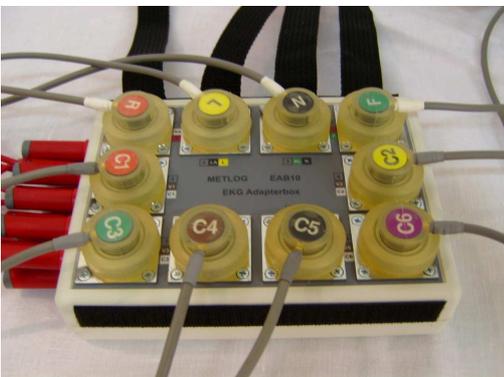


Fixierung der Elektroden

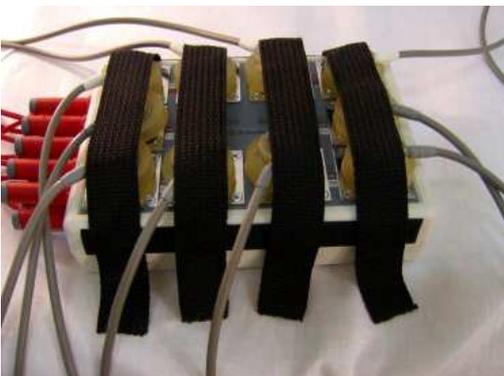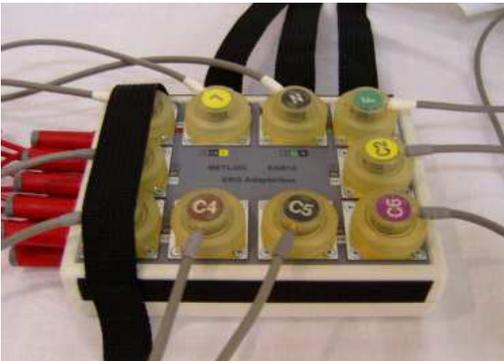

Der EAB zusammen mit dem elektrischen Sicherheitstester „ger“ zur Messung der Patientenableitströme



EAB in Anwendung mit einem Patientensimulator zur Applikation der EKG Signale auf die Saugelektroden

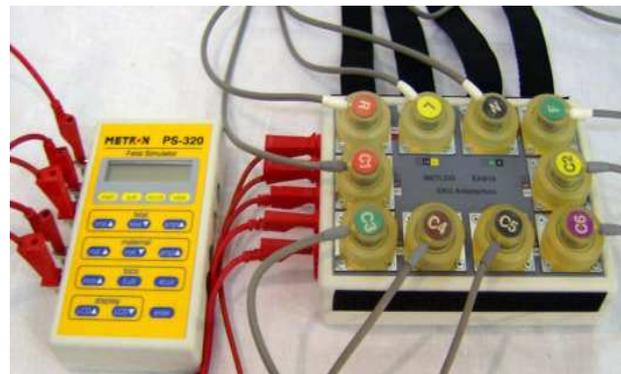

BESTELL-INFORMATIONEN:

ARTIKELNUMMER:

53.151: EAB 11

Optionales Zubehör:

53.152: Kabeladapter bestehend aus
10 hochwertigen Laborkabeln

53.153: Tragetasche

10.001: Snap-to-banana

Vorfürungen und weitere Informationen:

NEUTECH
Medizintechnik Stefan Neubauer

A-8072 Fernitz, Dr.-Hans-Kloepfer-Str. 22
Tel.: +43 (0)3135 48 49 111, Fax: 48 49 123
e-mail: office@neutec.at web: www.neutec.at